


liquiband flow control®



 **LIQUIBAND** *Flow Control™*

Liquiband Flow Control®,
der sterile, transparente
Hautkleber für den schnellen
Wundverschluss.

chirurgie hautkleber

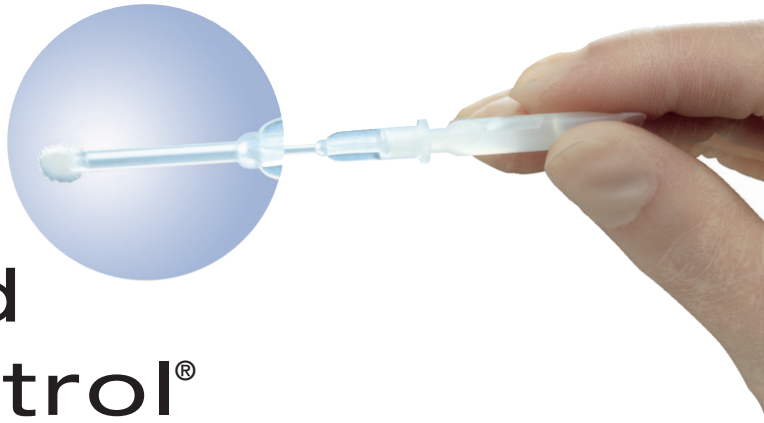

liquiband flow control®

Merkmale & Vorzüge:

- Schnelle Wirkung bei einfachster Anwendung
- Hohe mechanische Festigkeit
- Ausgezeichnete hämostatische Wirkung
- Reduziert das Infektionsrisiko durch antibakteriellen Schutzeffekt
- Kein schmerzhaftes Brennen beim Auftragen auf die Haut
- Keine Lokalanästhesie erforderlich
- Einzeln steril abgepackt
- Wirkstoff: n-Butyl-Cyanoacrylat

Gebrauchsanweisung:

Vorbereiten der Wunde

Die Wunde reinigen und sicherstellen, daß Wundränder und Hautumgebung trocken sind.



Applikation

Bringen Sie die Wundränder wieder zusammen. Tragen Sie jetzt einen dünnen Flüssigkeitsfilm auf die in Position gebrachten Wundränder. Vermeiden Sie dabei das Einsickern des Hautklebers in die Wunde. Halten Sie die Wundränder solange in Position, bis sich Liquiband® verfestigt hat.

Öffnen der Ampulle

Entnehmen Sie die Ampulle und den beigelegten Applikator aus der Verpackung. Halten Sie die Ampulle mit dem Verschuß nach oben und drehen Sie diesen ab. Bewahren Sie den Verschuß separat auf.



Wundverband

Liquiband® wirkt als mikrobielle Barriere. Es ist deshalb kein zusätzlicher Verband notwendig.

Befestigung des Applikators

Drehen Sie den Applikator auf den Ampullenhals auf.



Entsorgung

Drehen Sie den Applikator ab und stecken Sie den Verschuß wieder auf. Entsorgen Sie die Ampulle mit dem Applikator.

Darreichungsform:

Liquiband Flow Control®

ML-Liquiflow 10 Ampullen á 0,5 g

Hersteller:
medlogic Global Limited, UK
CE 0123 · 4/2008



zymed GmbH
Rennbahnweg 80
A-1220 Wien, AUSTRIA

Tel. +43/1/203 25 66
Fax +43/1/203 36 95-20
Email: office@zymed.at
www.zymed.at